

הכסא המוביל בע"מ

מספר חברה: 515105922

leadingchair@gmail.com

leadingchair.com

04-9522279

הכסא המוביל  
ניידות במדרגות



## כסא לאמבולנס

### הוראות הפעלה | E-412




פתח את הכסא על ידי משיכת מסגרת המושב ומשענת הגב בכיוונים מנוגדים.

פתיחה



וודא כי הלשונית הנועלת את הידית נמצאת במצב נעול וכי משענת הגב גם היא במצב נעול.

נעילה

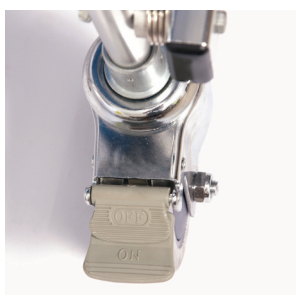

הפעל את מעצורי הגלגלים ע"י לחיצה עליהם בעזרת הרגל.

אבטחה

הושב את האדם על הכסא, חגור אותו בחגורת הבטיחות והורד את שתי הידיות בצדדים.

הושבה

## הוראות הפעלה | E-412 המשך



הוצא את ידיות הנשיאה התחתונות ממסילתן וודא שהן נעולות. ישר את ידיות הנשיאה העליונות.

הוצאת הידיות



נשיאת אדם תבוצע בעזרת שני אנשים שייאחזו בידיות וירימו את הכסא בנטייה של 30 מעלות.

הרמה ונשיאה



לחץ על כפתור הידית הארוכה ודחוף אותה פנימה. משוך את פס המתכת האחורי לכיוון מעלה וקפל את הכסא.

קיפול הכסא

### שים לב:

- אין להשתמש בכסא ללא הדרכה ע"י מדריך מוסמך מטעם החברה.
- אחת לשנה יש לערוך ביקורת תחזוקה לכסא המוביל ע"י אדם מיומן.

