



הכסא המוביל

ניידות במדרגות

leadingchair.com

טלפון: 04-9522279



סדין מילוט | דגם E-600 לשימוש בבתי חולים/בתי אבות

פינוי מהיר של המטופלים בשעת שריפה מהווה את אחד האתגרים הגדולים עבור בתי חולים ובתי אבות. ברגע גילוי העשן נפסקת פעולת המעליות והמטופלים, אנשי הצוות והמבקרים מתפנים מהבניין דרך חדר המדרגות ובמחלקות יישארו רק מטופלים שאינם מסוגלים לרדת ממיטתם.

באמצעות **סדין המילוט** המונחים באופן קבוע מתחת למזרן ניתן למלט במהירות ובבטיחות את המטופלים אל נקודת הפינוי שתקבע ע"י צוות החירום או מכבי האש.

ניתן להזמין את הסדין במספר מידות:
רוחב: 80 / 90 / 105 / 120 ס"מ
אורך: 190 / 200 ס"מ

סדין מילוט נועד לפנות במהירות אנשים המרותקים למיטה אל מחוץ לאזור הסכנה. הסדין מיוצר מפוליאסטר ופולימאייד, מתאים לשיקוף ברנטגן ועמיד לכביסה בחום גבוה.

המוצר עומד בדרישות התקן השוודי Swedish Standard SS 876 00 39 עבור סדיני מילוט.

הכנה ואימון הצוות לפינוי בחירום

במקרה של שריפה ומצבי חירום אחרים יש לפעול במהירות המרבית על מנת לפנות מספר רב של אנשים בזמן קצר. סדיני המילוט מאפשרים פינוי מהיר של המטופלים. אחת לתקופה יש לתרגל את אנשי הצוות בשימוש בסדין.

אימון


יש לתכנן מראש דרך מילוט לכל מחלקה על מנת לא ליצור עומס בחדרי המדרגות ובנתיבי הפינוי. מומלץ שהתרגול יתבצע בנתיב המילוט המיועד למחלקה כך שאנשי הצוות יכירו את דרך המילוט המיועדת למחלקה. לפני התרגול יש לבדוק את תקינות התפרים ואת הידיות בסדין. אנו ממליצים לסמן את הציווד המשמש לאימון כ"ציווד הדרכה" ולהשתמש בו אך ורק למטרה זו. יש לוודא כי המזרן יכול לשאת את משקל המטופל על מנת שלא לגרום לפגיעה בעת הירידה במדרגות.

מטרת האימון היא לימוד השימוש בסדין ותרגול ההתייחסות למטופל בעת הפינוי. יש לזכור כי בעת חירום המטופל יהיה מבוהל ונפחד ותלוי במיומנותו של איש הצוות המפנה. בתחילה ערכו את האימון עם המזרן בלבד ורק כאשר צוות החירום מיומן מספיק נכון לעבור לתירגול בעזרת אדם השוכב על המזרן. כאשר מתבצע אימון עם אדם השוכב על המזרן, יש לוודא כי בעת ירידה במדרגות יחזיק אדם נוסף ברצועה הקרובה לראשו של האדם השוכב על המזרן ובכך למנוע גלישה לא מבוקרת.

לפני התרגול יש לצפות בסרטון ההדרכה הנמצא באתר.
https://leadingchair.com/rescue_sheet



הוראות התקנה והפעלה

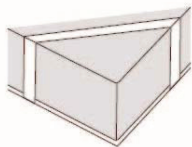

המאפשר את הוצאתם במהירות
הכנס את ארבע פינות המזרן לתוך
הרצועות בקצות הסדין.

← בדומה לאיור זה

המשך להוראות פינוי, בגב החוברת




פרוש את סדין המילוט מתחת למזרן
ובדוק את תקינותו, הנח את המזרן
על הסדין. וודא כי סרטי הסקוטש
משני צידי הסדין מושחלים באופן

הוראות ניקוי ותחזוקה

ניתן לנגב את הסדין בעזרת מטלית
רכה ספוגה בחומר ניקוי או חומר חיטוי
אלכוהולי. כאשר נעשה שימוש בכלור יש
להשתמש בריכוז מירבי של 1%.

כתמי דם יש להסיר מיד
בעזרת מים קרים.

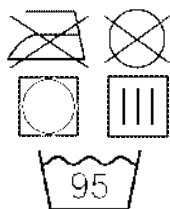

לפני הכנסה למכונה הכביסה יש
להדק ולקשור את רצועות הסקוטש.

כביסה במכונה:

טמפרטורה אידיאלית - 70°

טמפרטורה מקסימלית - 95°

אין לבצע ניקוי יבש ואין לגהץ את
הסדין אין לנקות בממיס אורגני
כמו איזופנטיל אלכוהול, אצטון,
כלורופורם, בנזין וכדומה.

אחסון

יש לאחסן את הסדין במקום יבש.

בסיום השימוש יש להשליך את הסדין למצבור
פסולת רגילה הניתנת לשריפה בתנאים רגילים.

אחריות ואורח חיים

אחריות לשלוש שנים.

האחריות אינה כוללת בלאי ונזקים בגין טיפול
לא תקין במוצר.

תקינה

• תקן SS-EN ISO 14971 בדיקת ניהול סיכונים

למכשירים רפואיים

• תקן SS-EN ISO 10993 בדיקת הערכה ביולוגית

של מכשירים רפואיים

• תקן SS-EN ISO 12952-1-2 בדיקת עמידה

בדליקה כתוצאה מהצתה של סיגריה

• תקן SS-EN 12182 בדיקת מוצרים המסייעים

לאנשים עם מוגבלות

סדיני המילוט תוצרת חברת **Care of Sweden**

עומדים בתקנים הבאים:

• תקן SS 876 00 39 התנגדות לאש למיטות וסדינים

בבתי חולים


• תקן SS 876 00 02 בדיקת איכות הבד לשימוש רפואי

• תקן SS 876 00 04 בדיקת טקסטיל רפואי עבור סדיני

מילוט




- הנמך את המיטה ונעל אותה
- סובב את המזרן 90 מעלות
- משוך כלפי מטה והחל בפינוי

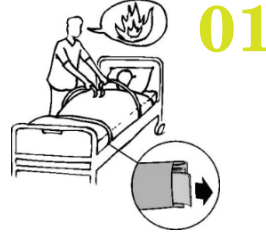

- יידע את המטופל/ת על הפינוי
- משוך והדק את רצועות המשיכה
- סביב המטופל/ת



- במדרגות פנה עם כיוון הירידה
- אחוז ביד אחת במעקה וביד השנייה משוך את המזרן

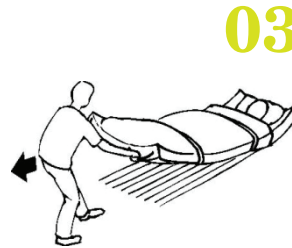

- בישורת אחוז ומשוך בידיות החיצוניות

- אם מתאפשר הנח כרית או שמיכה על הרצפה במקום הורדת המזרן משוך והורד את המזרן מטה והחל לגרור אותו כאשר פניך מופנים לעבר המטופל
- הרם את החלק הקדמי של המזרן כמה שיותר על מנת להקטין את החיכוך בין הסדין לרצפה
- בהגיעך למדרגות סובב את גופך באופן שפניך יהיו לכיוון הירידה, אחוז ביד אחד במעקה ווסת את מהירות הירידה למהירות בטוחה
- הנח את המטופל במקום שנקבע והחל בפינוי מטופל נוסף

- הסבר למטופל בקול רגוע כי עליך לפנות אותו עם המזרן אל מחוץ לבניין
- וודא שידי ורגלי המטופל עטופות בשמיכה וראשו מונח על הכרית
- וודא שראש המטופל מונח במקום שלא יפגע בעת הורדת המזרן לרצפה
- שלוף את סרטי הסקוטש משני צדי המזרן, העבר אותם מעל לשמיכה והדק אותם אחד למשנהו
- הנמך את המיטה ונעל את הגלגלים. אחוז בידית האחיזה של הסדין הנמצאת ליד רגלי המטופל וסובב את המזרן בין 90° ל-70°