



**הכסא המוביל**  
ניידות במדרגות

החברה היחידה המתכננת  
ומייצרת בעצמה כסא  
מטפס מדרגות המתאים  
לחדרי מדרגות בישראל.



## כסא ממונע

כסא חשמלי, פשוט ונח לתפעול,  
יורד ועולה מדרגות בקלות

[leadingchair.com](http://leadingchair.com)

## E-422 | הוראות הפעלה




### פתיחת הכסא

ביד אחת תפוס בידיית האחיזה וביד שניה פתח את הכסא.



### סגירת הכסא

הרם את המוט האדום והחלק את הידית כלפי מטה.

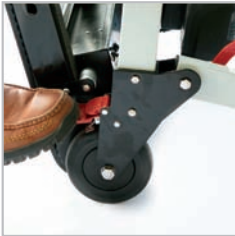

### נעילת גלגלים ושחרורם

**לנעילה:** דחוף את החלק התחתון של סגר נעילת הגלגל כלפי מטה.

**לשחרור:** דחוף את החלק העליון של סגר נעילת הגלגל כלפי מטה.



### התאמת ידית האחיזה

משוך את המוט האדום מעלה, והרם את הידית לגובה המתאים. וודא כי ננעלה במקומה.



### סגירת ידית האחיזה

משוך את המוט האדום ודחוף את ידית האחיזה למקומה.



## פתיחת מרכב הרצועות והמנוע

שחרר את וו הנעילה ומשוך את מרכב הרצועות והמנוע לכיוונוך.



## סגירת המרכב

דחוף את המוט האדום הנמצא על המרכב כלפי מטה.



## הורדה והעלאה במדרגות

- הושב את האדם וחגור אותו ברצועות הבטיחות.
- הרם את הידית למצב נוח עבורך.
- דחוף את הכסא עד שיגיע לתחילת המדרגות.
- וודא כי המדרגות אינן רטובות/חלקות ממים/שמן או אבק.
- הטה את הכסא באלכסון על ידי משיכתו בידיית.
- לחץ על הלחצן המתאים ודחוף את ידית האחיזה קלות כלפי מטה.
- בעת הפעלת הכסא החזק בחלק העליון בשתי ידיים.
- בהגיעך למשטח ישר, אחוז ביד אחת בידיית האחיזה העליונה, ביד השניה בידיית הובלה וסובב את הכסא בזהירות כלפי גרם המדרגות הבא.



תאורת חירום



ירידה במדרגות



טיפוס במדרגות



הפעלה/כיבוי

- לחיצה על לחצן אמצעי מדליקה/מכבה את המערכת.
- לחיצה על לחצן ימיני מפעילה את המנוע לטיפוס במדרגות.
- לחיצה על לחצן שמאלי מפעילה את המנוע לירידה במדרגות.
- לחיצה על לחצן תאורה מפעילה את תאורת החירום.



- כחמש שעות נדרשות לטעינה מסוללה ריקה למלאה.
- סוללה מלאה מספיקה לכשעה וחצי עבודה רצופה.
- ניתן לטעון את הסוללה גם מבלי להוציאה ממקומה.
- העבר את מתג הסוללה למצב פתוח (1)
- חבר את הכבל לסוללה
- חבר את התקע לשקע שבקיר
- בסיום הטעינה - נתק את התקע מהקיר והוצא את הכבל מהסוללה

## שלבי טעינת סוללת הליתיום

- יש להשתמש אך ורק במטען המקורי
- התחל לטעון את הסוללה כאשר שתי נורות חיווי התחוננות דולקות
- הפסק את הטעינה לאחר שכל הנורות דולקות ונתק את המטען
- אל תשאיר את המטען מחובר לסוללה לאחר סיום הטעינה
- יש לנתק את המטען מיד בסיום הטעינה
- אל תשאיר סוללה טעונה 100% לתקופה ארוכה (לא יותר מכמה ימים)
- כאשר לא משתמשים בכסא מומלץ להטעין את הסוללה פעם בחודש.

## שמירת אורך החיים של הסוללה

נזק למטען או לסוללה שנגרם כתוצאה ממתח לא יציב או ברקים אינו מכוסה במסגרת האחריות

## אחריות

## הוראות בטיחות ותחזוקה לכסא E-422

### הוראות בטיחות

- מפעיל הכסא מחוייב בהדרכה אישית המבוצעת בבית הלקוח/משרדי החברה ע"י מדריך מוסמך של חברת הכסא המוביל - אין להפעיל את הכסא ללא הדרכה.
- על מפעיל הכסא להיות אדם בוגר וחזק מספיק על מנת להתמודד עם מצב בלתי צפוי. (תזוזת הנוסע, עצירת הכסא, החלקה מהירה וכו').
- אין להפעיל את הכסא במדרגות בהן השיפוע גדול מ-32° או ששפת המדרגה חדה או כשהמגלשיים מונחות רק על שתי מדרגות ולא על שלוש כנדרש.
- יש לאחוז את הכסא תמיד בשתי הידיים. אין להחזיק דבר מה ביד, כגון: טלפון נייד, משקה וכדומה.
- אין לגעת ברצועה או בגלגלי השיניים של המנוע.
- הכסא נועד לשימוש במדרגות, אין להפעילו בכביש או מדרכה.
- אין לשנע בכסא אדם שמשקלו עולה על 130 ק"ג.
- אסור לילדים לשחק או להפעיל את הכסא.
- רטיבות, שמן או אבק על המדרגות יגרמו להחלקה מהירה ולא מבוקרת, לכן יש להימנע משימוש בכסא כאשר המדרגות חלקות או מאובקות.
- יש לשמור את הכסא תמיד במצב יבש ונקי, אין להתזיז על הכסא מים או נוזלים אחרים.
- יש לכבות את הכסא בין הפעלה להפעלה בעזרת הכפתור האמצעי על קופסת הפיקוד. בתקופות ארוכות יותר יש לכבות את המפסק שעל הסוללה.
- למען בטיחותך יש לפעול אך ורק לפי הוראות ההפעלה והשימוש המוצגות כאן וסרטי ההדרכה שבאתר החברה.
- טעינת הסוללה יוצרת חום ועלולה לגרום לשריפה. לכן אין להשאיר את הסוללה בטעינה ללא השגחה. טעינת הסוללה תעשה במקום נקי ממוצרים דליקים מכל סוג העלולים להדלק בחום.
- אין להשאיר את המטען מחובר למקור חשמל כאשר לא מתבצעת טעינת סוללה.
- בכל מקרה של תקלה יש להפסיק מיד את השימוש בכסא וליידע את נציג החברה בטלפון 04-9522279 או במייל [leadingchair@gmail.com](mailto:leadingchair@gmail.com)
- אין לשנות או להוסיף חלקים בכסא שלא סופקו ע"י חברת הכסא המוביל בע"מ.

### הוראות תחזוקה

- אחת לשנה מומלץ לערוך בדיקה ע"י טכנאי מוסמך מטעם החברה.
- לפני כל הפעלה ואחת לשבוע בדוק וודא כי רצועות ההחלקה במצב טוב ואינן סדוקות, יבשות, רופפות או קרועות.
- בכסאות המקופלים לעתים קרובות (אמבולנסים, בתי חולים וכד') יש לעבור עם מברשת ספוגה בשמן מכוונת תפירה אחת לחודש על שלושת המסילות שבתוכן יש חלקים נעים. (מוטות ידית האחיזה, שתי המסילות בהן נעים המוטות האדומים).
- אין לנקות את הכסא במים או בחומרי ניקוי כימיים - הניקוי יעשה בעזרת מטלית לחה בלבד.

### תנאי האחריות

האחריות הינה לפי תנאי חוק תקנות הגנת הצרכן - 2006. האחריות למוצר משומש או מוצר שנמכר מתצוגה היא ל-3 חודשים בלבד.

### נזקים עקיפים

כתב האחריות אינו מכסה בכל צורה נזק לצד ג', נזקי גוף או נזקים לרכוש. מוסכם בזאת כי המשתמש ידאג לכל כיסוי ביטוחי הנדרש או הצפוי משימוש במוצר.

### מקרים בהם לא תחול אחריות החברה

פגיעה כתוצאה מרשלנות הצרכן, כגון: מכה חזקה, חשיפה לחום בלתי סביר, חומרים כימיים, לחות, חלודה, שריטות, דהייית הצבע בשמש, וכן שימוש שלא לפי ההוראות, תיקון/שינוי שבוצע לא על ידי נציג החברה. האחריות אינה מכסה נזק למטען או לסוללה שנגרם כתוצאה ממתח לא יציב או פגיעת ברק.

### תיקון והחזרת מוצרים

הבאתו והחזרתו של המוצר לחנות המכירה ו/או תחנת שירות לשם תיקון או כתוצאה מביטול עסקה היא באחריותו המלאה של הלקוח.

ביטול עסקה יתבצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 ויעשה רק במקרה ולא נעשה שימוש במוצר. לא ניתן להחזיר כסא משומש או כסא מתצוגה.

תיקון המוצר יבוצע תוך עשרה ימי עבודה מיום קבלת המוצר בתחנת השירות.

החברה תמסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט של התיקון והחלקים שהוחלפו.





## הכנסו לאתר שלנו בו תוכלו להתרשם מ- מוצרים מצילי חיים נוספים

E-400 | כסא פינוי וחילוץ




כסא ידני להורדת אנשים עם מוגבלות בשעת חירום באופן מהיר ובטוח.

E-600 | סדין מילוט



סדין מילוט נועד עבור אנשים המרותקים למיטתם ויש לפנותם במהירות למקום מבטחים.

E-700 | סולם מילוט  
ציוד חובה בכל בית

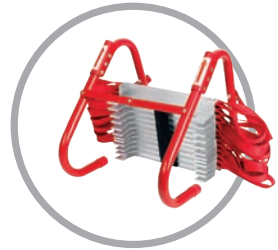

בעזרת סולם מילוט נייד ניתן לרדת במהירות דרך החלון או המעקה של הדירה לקומות התחתונות של הבניין.



מספר חברה: 515105922

[leadingchair.com](http://leadingchair.com)



[leadingchair@gmail.com](mailto:leadingchair@gmail.com)



04-9522279

